

COMPEED® Ballenschutz

- Sofortige Schmerzlinderung
- Trägt zur Vorbeugung von Blasen bei
- Dünn und diskret

Wie wirkt COMPEED®?

COMPEED® Ballenschutz Pflaster sind so konzipiert, dass sie den Bereich des Großzehenballens ganz umschließen und maximalen Tragekomfort bieten. Die Hydrokolloidtechnologie trägt dazu bei, die Haut geschmeidig zu halten und weiteren Druck abzupolstern. Sie schützt auch vor Schwellungen, Blasen und weiteren Verhärtungen der Haut rings um den Ballenbereich.

COMPEED® Ballenschutz Pflaster wirken auch gegen lokal begrenzte Blasen oder Hautverhärtungen, die sich bereits rings um den Ballenzeh gebildet haben.

Anwendung

1. Die Hautstelle rund um den Ballenzeh muss sauber, trocken und frei von Creme- und Fettrückständen sein.
2. Das COMPEED® Pflaster vor dem Anbringen eine Minute lang zwischen den Händen anwärmen.
3. Das mit COMPEED® bedruckte Deckpapier abziehen und das große weiße Schutzpapier an der Unterseite des COMPEED® Pflasters abziehen.

4. Nicht die Haftseite des Pflasters berühren. Das COMPEED® Pflaster direkt auf den Ballenzeh kleben.

5. Das COMPEED® Pflaster eine weitere Minute lang anwärmen, indem Sie nach dem Aufkleben eine Hand darauf legen.

6. Das COMPEED® Pflaster erst entfernen, wenn es beginnt sich von selbst zu lösen.

7. Das COMPEED® Pflaster nach Bedarf durch ein neues ersetzen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pflastern hat das COMPEED® Pflaster eine potentiell längere Tragezeit von bis zu mehreren Tagen. Während des Heilungsprozesses löst sich das Pflaster von alleine ab. Sollte es nötig sein, das COMPEED® Pflaster zu entfernen, kann es entlang der Hautoberfläche gedehnt werden, als wollte man es in die Länge ziehen.

Warnhinweise

Diabetiker: In den meisten Fällen ist COMPEED® für Diabetiker gut geeignet. Bitte halten Sie dennoch vor der Anwendung mit Ihrem Hausarzt Rücksprache, da der Einsatz eines COMPEED® Pflasters bei einer entzündeten Wunde Komplikationen nach sich ziehen kann.

COMPEED® Pflaster niemals zurechtschneiden, denn die Ränder sind speziell geformt, damit das Haftgel nicht austreten kann.

Eventuelle Klebstoffrückstände in Strumpfhosen, Strümpfen oder Schuhen können leicht mit Terpentinersatz entfernt werden